


Hoe plaats ik een otoplastiek in het oor?

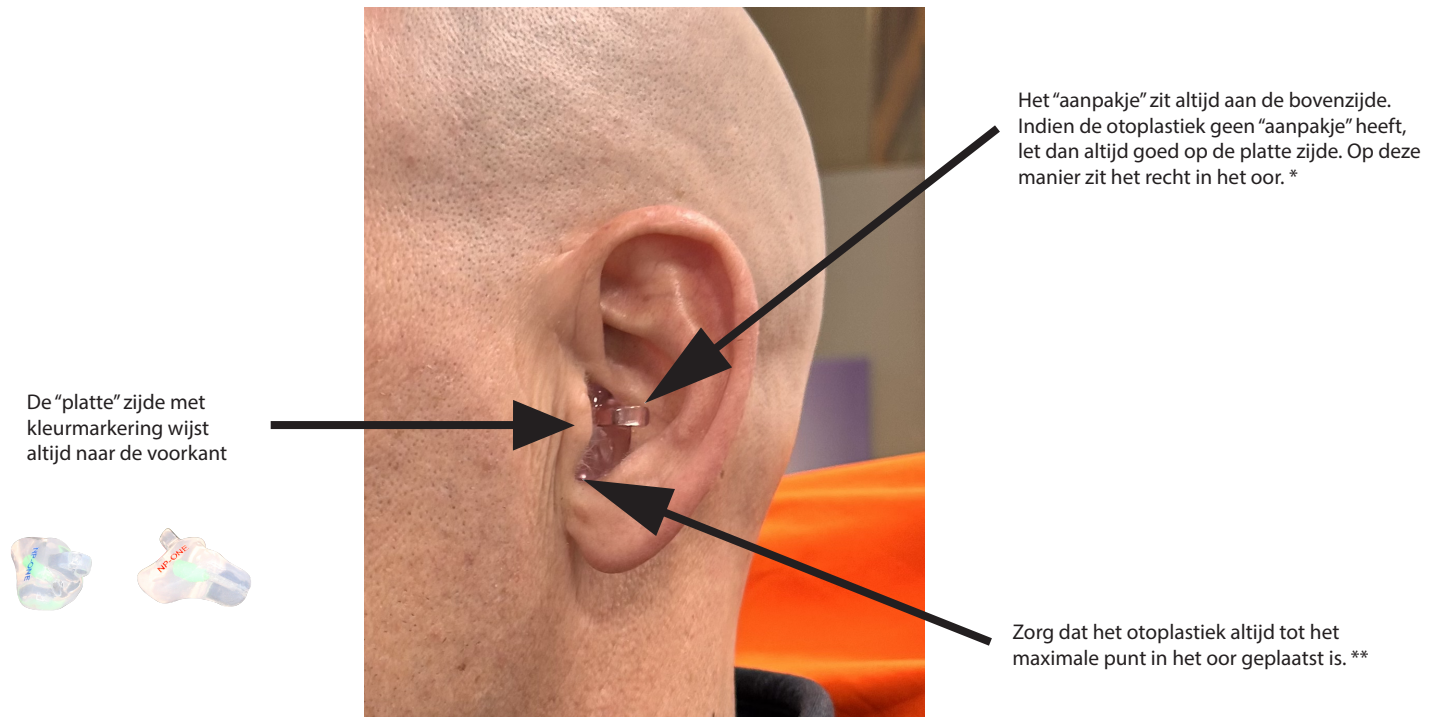

Alle otoplastieken hebben een kleurmarkering. De basis is dat een rechtse otoplastiek een **rode** kleur heeft. De linkse heeft een **blauwe** kleur.

In sommige situaties kan een andere kleur gebruikt zijn. Kijk dan goed naar de blauwe of rode markering. Deze blijft tenminste aan 1 zijde origineel. Heeft u bijvoorbeeld een blauwe otoplastiek, dan zal de linkerzijde geen blauwe kleurmarkering hebben, maar de rechtse zal nog steeds rood gemarkeerd zijn.

Plaatsen:

- 1: Neem het otoplastiek vast bij het "aanpakje". Exact zoals deze in het oor geplaatst dient te zijn. Draai deze niet.
- 2: Til het otoplastiek op zonder te draaien en breng recht naar de gehoorgang. *
- 3: Duw het otoplastiek langzaam in het oor en schuif deze met de gehoorgang mee. De gehoorgang loopt naar achteren en lichtjes omhoog.
- 4: Het otoplastiek zit ver genoeg als deze - zoals in de afbeelding - zonder veel weerstand niet verder gaat. **

Om het inbrengen te vergemakkelijken kan met de andere hand aan het oor getrokken worden om de gehoorgang tijdelijk iets rechter te maken.

Verwijderen:

Bij het verwijderen van het otoplastiek, maak de omgekeerde beweging. Trek rustig aan het "aanpakje" en beweeg mee met de gehoorgang. Het otoplastiek komt vanzelf uit het oor. Indien u geen "aanpakje" heeft, duw dan lichtjes aan de onderkant van uw oor. Met de andere hand kunt u dan eenvoudig de otoplastiek uit het oor nemen.

Noot: silicone otoplastieken zijn iets stroever van eigenschap. Het kan helpen om deze nat te maken of in te smeren met een huidvriendelijke substantie.